

# Innsending av dødt eller avlivet vilt for obduksjon - instruks til innsender

## Ved mistanke om smittsom sykdom

hos ville dyr skal man alltid varsle Mattilsynet. Det lokale Mattilsynet kan alltid nås på telefon 06040. Mattilsynet vil da avgjøre om de vil undersøke dyret og forestå innsendelse, eller om dette er noe du kan gjøre selv. Dersom du skal sende inn dyret selv ber vi deg ta kontakt med Seksjon for vilthelse ved Veterinærinstituttet i Oslo på tlf 23216353 slik at det kan avtales nærmere.

Adresse til Veterinærinstituttet i Oslo ved innsending av Postens "Ekspress - Over natten":

*Mottaker/navn*  
Seksjon for vilthelse  
Veterinærinstituttet i Oslo

**NB !! Leveringsadresse NB !!**  
**Ullevålsveien 68**  
**0454 OSLO**

Adresser til de regionale laboratoriene finnes på [www.vetinst.no](http://www.vetinst.no)

## Krav til emballering

I henhold til den nye landtransportforskriften stilles det nå krav om innpakning i minst 3 lag og at ytteremballasjen er stiv. Emballasjen må påføres et spesielt merke (UN 3373) og teksten "Biologisk stoff, kategori B" i nærheten av dette.

## Utstyr:

1. engangs plasthansker
2. to sterke sekker av gjennomsiktig plast,
3. sterk hyssing eller strips
4. væskeabsorberende papir (avis eller lignende)
5. kjøleelementer
6. stiv eske til ytteremballasje
7. Veterinærinstituttets rekvisisjonsskjema eller et brev med opplysninger
8. konvolutt
9. sterkt limbånd

## Framgangsmåte ved prøvetaking:

Ta på plasthansker. Brett ut den ene plastsekken slik at den blir stående åpen. Legg kjøleelementene på kadaveret og rull det inn i avispapiret. Legg det innrullede kadaveret nedi den åpne plastsekken uten å komme i kontakt med utsiden av sekken eller klærne dine. Hanskene vrenses av og puttes ned i sekken sammen med kadaveret. Sekken lukkes med hyssing eller strips. Plastsekken med kadaveret legges nedi den andre plastsekken som lukkes på samme måte.

Før innsending legges det plastinnpakkede kadaveret i en solid pappeske. Et rekvisisjonsskjema (finnes på [www.vetinst.no](http://www.vetinst.no)) eller et brev med opplysninger legges i en konvolutt som teipes godt fast til utsiden av eska. Pakken skal merkes med et merke som det vist nedenfor, og teksten "Biologisk stoff, kategori B" skal påføres rett i nærheten av merket. Pakken sendes til laboratoriet på hurtigst mulige måte (for eksempel Postens Ekspress - Over natten-pakke).

## Prøvemateriale:

Det er liten vits i å sende inn knokkelrester, avrevne kroppsdeler eller fullstendig opprånede eller oppspiste kadavre. Det skal i regelen bare sendes inn nylig døde dyr. Er du i tvil om dette - ring og spør!

## Rutiner for prøvesvar:

Veterinærinstituttet sender ut en obduksjonsrapport når denne er klar. En del analyser kan imidlertid ta lang tid, så det kan gå to til tre uker før du får skriftlig svar. Ønsker du å høre etter hva som ble funnet ved obduksjonen, er du velkommen til å ringe Seksjon for vilthelse på 23216353 eller skrive en e-post til

vilt@vetinst.no.



Biologisk stoff, kategori B