

OK-2016: Aviær influensa (AI) - villfugl

Generell informasjon

Fugleinfluensa forårsakes av influensavirus A og rammer en rekke fuglearter, inkludert fjørfe. Det finnes mange ulike varianter av viruset, og de opptrer vanligvis i en lite eller ikke sjukdomsfremkallende form. Ville fugler, spesielt ande-, måke- og vadefugler kan være bærere av ulike varianter av influensavirus uten å bli syke (friske smittebærere).

Norge overvåker situasjonen hos tamme fugler, og i enkelte år også i ville fugler - sist i 2010. I 2016 skal ville fugler igjen undersøkes.

Det legges opp til prøvetaking fra 400 ender og 100 måker felt under jakt. Vi ønsker primært prøver fra viktige gressender som stokkand, krikkand og brunnakke. Også andre ender som kvinand, laksand, siland, svartand og toppand er aktuelle. Vi ønsker imidlertid ikke prøver fra ærfugl. Blant måkefuglene ønskes primært prøver fra gråmåker.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte innsamlingen når vi har mottatt 500 prøver, uavhengig av om alle har fått sendt inn alle prøvene sine.

Dette informasjonsskrivet sendes jegere som har deltatt i prøvetaking av villfugl tidligere eller som jakter i områder som vi ønsker å undersøke nærmere. Selve prøvetakingen er beskrevet på neste side.

Dere blir honorert for arbeidet med kr 300/godkjente prøvesett fra hver fugl og et samlet honorar utbetales ved avsluttet jakt.

For at innsendingen skal godkjennes må innsendingsskjemaet være korrekt utfylt, samt tre prøver fra hver fugl og venstre vinge pakket korrekt og lagt i returkonvolutten. Utbetaling krever også at du har lagt inn korrekt navn, adresse, kontonummer og personnummer ved påmeldingen på www.vilthelse.no for at økonomiavdelingen vår skal kunne overføre honoraret til deg. Skattetrekket er 50% og Veterinærinstituttet henter skattekortet elektronisk fra Skatteetaten.

Prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte returkonvolutter sendes ut fra Veterinærinstituttet.

Informasjon om prøvetakingssted og dato

GPS (UTM/EU89 sone 32)				Prøvetakingsdato	
Lokalitetsnavn		Kommune		Fylke	

Detaljer om dyret

Art:	<input type="checkbox"/> Stokkand	<input type="checkbox"/> Krikkand	<input type="checkbox"/> Brunnakke
	<input type="checkbox"/> Hettemåke	<input type="checkbox"/> Gråmåke	<input type="checkbox"/> Fiskemåke
Annen art (spesifiser):			

Kjønn:	<input type="checkbox"/> Hunn	<input type="checkbox"/> Hann	<input type="checkbox"/> Vet ikke
---------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Alder:	<input type="checkbox"/> Årsunge	<input type="checkbox"/> Voksen	<input type="checkbox"/> Vet ikke
---------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Eventuelle tilleggsopplysninger, f. eks. tegn på sykdommer/skader:

Prøvetaker

Navn			Telefon	
Adresse		Epost		
Signatur, sted og dato				

OK-2016: Aviær influensa (AI) - villfugl

Prøvetaking

Det skal tas **tre** svaberprøver fra hver fugl:


- Svaber (med **rød** kork) fra kloakkåpningen puttes i ett prøverør (merkes **kloakk**)
- Svaber (med **svart** kork) fra kloakkåpningen puttes i ett transportrør (merkes **kloakk**)
- Svaber (med **rød** kork) fra luftrørsåpning/svelg puttes i et prøverør (merkes **svelg**)

Svabre fra kloakkåpningen

- Finn frem én prøvepakke og ta på **engangshansker** (svaberpinne og transportrør (**rød** kork med **rød** væske)).
- Ta ut svaberpinnen fra plasten uten at selve bomullsspissen berøres.
- Før svaberspissen inn i fuglens **kloakkåpning** og rotér rundt slik at den blir påført avføring.
- Putt bomullsspissen ned i væsken i prøverøret, og brekk av pinnen mot kanten av røret ved pinnens «brekkpunkt» (merket med **rød** strek) slik at hele prøvepinne får plass i røret.
- **Skru lokket godt på**, og kontroller at prøverøret ikke lekker!
- Merk røret med **rød** kork med «**Kloakk**» og legg dette røret inn i beskyttelsesrøret med **blå** kork og skru godt igjen.
- Finn frem én ny prøvepakke (svaberpinne med **svart** kork og transportrør (**svart** gelé)).
- Ta ut svaberpinnen fra plasten uten at selve bomullsspissen berøres.
- Før svaberspissen inn i fuglens **kloakkåpning** og rotér rundt slik at den blir påført avføring.
- Putt bomullsspissen ned i den svarte geléen i prøverøret til korken sitter fast

Svaber fra luftrørsåpning/svelg

- En ny prøvepakke (svaberpinne og transportrør (**rød** kork med **rød** væske)) åpnes på samme måte som over.
- Før svaberspissen rundt i området rundt **luftrørsåpningen/svelget**. Deretter roteres spissen rundt inne i **selve luftrørsåpningen** (gul ring på bilde til høyre).
- Putt bomullsspissen ned i væsken i prøverøret, og brekk av pinnen mot kanten av røret ved pinnens «brekkpunkt» (merket med **rød** strek) slik at hele prøvepinne får plass i røret.
- **Skru lokket godt på**, og kontroller at prøverøret ikke lekker!
- Merk røret med **rød** kork med «**Svelg**» og legg dette røret inn i beskyttelsesrøret med **blå** kork og skru godt igjen.

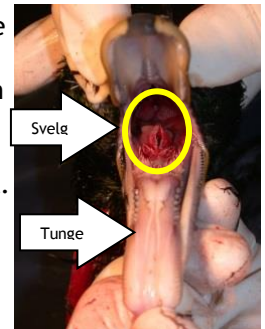

Fjerning av vinge

- Legg fuglen på brystet, dra ut **venstre** vinge, skjær inn på huden og muskulaturen rundt skulderleddet (se bilde til høyre).
- **Kutt** av vingen gjennom skulderleddet.
- Pakk inn vingen i plastposen og knyt igjen.



Pakking og forsendelse av prøver

- Fyll ut innsendingsskjemaet (side 1 i dette skrivet).
- Legg innsendingsskjemaet, plastposen med vingen, begge beskyttelsesrørene (med prøverørene inni) og transportrøret med svart kork i en ferdig frankert returkonvolutt.
- Postlegg konvolutten samme dag eller senest *dagen etter prøveuttaket*.
- Prøver som må lagres over natt før innsending **må oppbevares i kjøleskap/kjølig**.

NB ! Viktig at det bare er prøver og innsendingsskjema fra en fugl i hver returkonvolutt!

Kontaktpersoner

- Mattilsynet: Kjell Hauge, 22 77 90 23, kjell.hauge@mattilsynet.no
- Veterinærinstituttet: Knut Madslie, 23 21 63 75, knut.madslie@vetinst.no